



photizo[®]
Vetcare

Une vie meilleure grâce à la lumière

Photizo[®] Vetcare
Guide d'Utilisation des Produits Vétérinaires



Parmi la gamme Photizo® Home, sont également disponibles :

photizo
Pain Relief

- Photizo® Pain Relief soulage la douleur et réduit le gonflement et l'inflammation, en particulier chez les patients arthritiques – il permet également le rétablissement rapide de la fonction articulaire à la suite d'une blessure. Utile pour traiter la douleur et l'inflammation associées aux pathologies articulaires, telles que toutes les formes d'arthrite et de goutte. Photizo® Pain Relief réduit les crampes musculaires et augmente le diamètres des vaisseaux sanguins et lymphatiques, afin d'évacuer les toxines et augmenter l'apport d'oxygène et de nutriments dans les zones traitées.

photizo
Skin Care

- Photizo® Skin Care propose un mode de traitement complémentaire efficace et non-invasif, pour une utilisation dans le cadre de traitements anti-âge et à des fins cosmétiques, contre l'acné et les boutons, le traitement des plaies (aigües et chroniques) et autres dommages de la peau, tels que les écorchures, coupures, cloques, brûlures mineures et coups de soleil, psoriasis, eczéma et autres états inflammatoires de la peau, ainsi que les herpès labiaux.

photizo
Sinus

- Photizo® Sinus propose un mode de traitement complémentaire non-invasif, pour une utilisation dans le cadre de traitements contre la sinusite, l'otite, le mal de gorge/la laryngite, les cordes vocales enflammées, la rhinite/les rhinopathies, l'amygdalite, les rages de dents et autres états particuliers.

photizo
Sport

- Photizo® Sport soulage la douleur en stimulant les cellules ayant besoin d'être réparées et traitées, et réduit également l'enflure et l'inflammation. Photizo® Sport est efficace dans le traitement de la douleur et de l'inflammation associées aux blessures spécifiques à la pratique intensive du sport, telles que les blessures au genou des coureurs, les blessures au tibia, les blessures au coude des joueurs de tennis et de golf, etc. Photizo® Sport stimule la guérison, soulage la douleur, l'enflure et l'inflammation, diminue les crampes musculaires et augmente le diamètres des vaisseaux sanguins et lymphatiques, afin d'évacuer les toxines et augmenter l'apport d'oxygène et de nutriments dans les zones traitées.

Une vie meilleure grâce à la lumière

Merci et félicitations pour votre achat !

Vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'un Photizo Vetcare.

Vous pouvez vous attendre à des années de fonctionnement optimal et sans l'ombre d'un problème, avec le Photizo Vetcare. Beaucoup d'efforts, de travail intellectuel, de dévouement et de recherche ont été mis en œuvre pour vous apporter cet appareil étonnant.

Nous souhaitons que cet appareil vous aide dans le traitement de votre animal, le soulagement de la douleur et l'état de santé général, comme beaucoup d'autres en ont déjà fait l'expérience. Nous sommes fiers d'être le nouveau partenaire qui va vous accompagner sur le chemin du bien-être.

Merci de visiter notre site pour plus d'informations:



- NOTES -

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Photizo® Vetcare a été développé par une équipe de physiothérapeutes, biologistes, vétérinaires ingénieurs pour proposer un système simplifié, d'utilisation facile. Nous sommes fiers que ce produit soit conçu selon les normes de qualité les plus élevées et n'utilise que des composants de la plus grande qualité. Veuillez noter que PHOTIZO® VETCARE NE REMPLACE PAS UN AVIS MEDICAL NI UN TRAITEMENT, MAIS REPRESENTE UN APPAREIL DE TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE. NE CONSIDEREZ PAS QUE LA THERAPIE PAR LA LUMIERE EST UN TRAITEMENT QUI CONVIENT A TOUS LES ETATS DE SANTE. PHOTIZO® VETCARE N'EST PAS UN OUTIL DE DIAGNOSTIC ET NE DOIT PAS SE SUBSTITUER A UN TRAITEMENT MEDICAL.

Contact

Photon Therapy Systmes (Pty) Ltd

Tel: 0861 640 640

Caball Therapy Systems post@caball.biz

E-Mail: info@Photizo.net

Site Internet: www.Photizo.net

AVERTISSEMENT!

N'UTILISEZ QUE LE CHARGEUR DE BATTERIE PHOTIZO® FOURNI AVEC L'APPAREIL POUR CHARGER LES PILES. TOUT AUTRE CHARGEUR PEUT ENDOMMAGER LES PILES OU LE PHOTIZO® VETCARE.

GARANTIE

Ce produit est fourni avec une garantie d'1 an retour atelier, à compter de la date d'achat, sous condition de présentation de la facture d'achat originale. AUCUNE réclamation au titre de la garantie, suite à un dommage intentionnel, la fuite d'une pile, une chute accidentelle, un dommage causé par l'eau ou un solvant organique ne sera admise. Les piles sont expressément exclues de la garantie. Veuillez noter que des spécificités peuvent varier de celles présentées dans le présent manuel.

Si vous avez besoin d'aide ou si votre produit est endommagé, merci de contacter votre distributeur le plus proche ou d'envoyer un e-mail à : info@Photizo.net.

Introduction

A travers les âges, la lumière du soleil (la forme la plus ancienne de la photothérapie) est connue pour avoir à la fois des vertus thérapeutiques et liée au bien-être. La lumière est énergie et l'énergie nourrit la vie-elle ne peut pas être détruite, mais elle peut être transformée en d'autres formes.

Le Photizo® Vetcare est un appareil à LED qui émet de la lumière rouge et infra-rouge, pénétrant la peau pour stimuler la production d'énergie et d'autres processus métaboliques dans des zones ciblées. La lumière infrarouge est une des seules thérapies physiques agissant pour créer un effet curatif. Les cellules lésées peuvent réellement être régénérées par la lumière.

Les diodes électro-luminescentes (LED) ne fournissent pas assez de puissance pour endommager le tissu, mais délivrent assez d'énergie pour favoriser l'auto-guérison naturelle et le soulagement de la douleur. Avec sa puissance utile optimisée pour être plus efficace, les LED délivrent les mêmes ondes de lumière que les lasers, mais de façon beaucoup plus douce et sans le risque de dommage accidentel aux yeux que possède le laser.

Les LED sont des appareils très pratiques pour produire de la lumière à des ondes spécifiques, et plusieurs études ont établi que c'est la lumière elle-même, à des ondes spécifiques, qui est thérapeutique par nature. Tous les systèmes biologiques ont un spectre d'absorption unique déterminant quelles ondes de radiation seront absorbées pour produire un effet thérapeutique donné. Il a été montré que les portions rouges visibles et infra-rouges invisibles du spectre ont des effets thérapeutiques uniques et hautement absorbants sur les tissus vivants. Les LED permettent aussi au faisceau lumineux de se déployer au lieu d'être un faisceau lumineux localisé. La diffusion à angle large des LED leur confère une plus grande facilité d'application, puisque les émissions de lumière sont capables de pénétrer une plus grande surface et cela aboutit à un temps de traitement plus rapide que le laser pour une surface donnée.

Le Photizo® Vetcare offre des dosages efficaces, pré-programmés, accessibles en une seule touche, de lumière LED proche infra-rouge, pour le traitement de nombreux états douloureux et inflammatoires. Photizo® Vetcare assure que la quantité efficace de dosages/joules pour des états spécifiques est délivrée précisément et sans effort.

Si vous avez besoin d'aide ou si votre produit est endommagé, merci de contacter votre distributeur le plus proche ou d'envoyer un e-mail à : info@Photizo®.net.

Que puis-je traiter avec le Photizo® Vetcare ?

Photizo® Vetcare est conçu pour traiter :

- Les animaux domestiques-chiens et chats
- Les grands élevages-boeuf, mouton, chèvre, cochon, chevreuil, etc.
- Les chevaux

Photizo® Vetcare soulage la douleur, stimule les cellules pour qu'elles se réparent et guérissent, réduit l'enflure et l'inflammation, et stimule le système immunitaire dans des conditions traumatiques aiguës. Photizo® Vetcare est efficace pour traiter la douleur chronique et les états inflammatoires associés aux pathologies arthritiques et aux blessures de fatigue. Photizo® Vetcare favorise la guérison, soulage la douleur, l'enflure et l'inflammation, réduit les crampes musculaires et augmente le diamètre des vaisseaux sanguins et lymphatiques, assurant ainsi l'élimination des déchets et permettant l'afflux d'oxygène, de nutriments et de concentrations en médicaments dans les zones traitées.

Photizo® Vetcare a prouvé son efficacité dans le traitement de :

- **Pathologies de la peau :**
plaies, lacérations, nécroses suite à des morsures de tiques hyaloma, abcès, lésions dues au parasite habronema, cicatrices granuleuses, granulomes de léchage, meurtrissures, otites externes, pyodermites, pododermatites, allergies cutanées, eczéma, etc.
- **Troubles musculo-squelettiques :**
arthrite, tendinite, myosite, entorse/tension du ligament/tendon, meurtrissure, fracture, douleur du cou et du dos, attelle, blessure de fatigue, synovite, oedème, hématome, blessure et crampe musculaires, point d'injection, sérome, mastite, etc.
- **Post-opératoire :** toute zone traitée par la chirurgie, y compris les greffes cutanées.
- **Autres :** ulcère cornéen, états associés à un virus/herpès, sinusite, traumatisme rétro-orbitaire.

Merci de lire attentivement les directives suivantes relatives au mode de traitement et aux instructions de fonctionnement, avant d'utiliser le Photizo® Vetcare, afin de garantir une utilisation optimale.

Résolution des problèmes techniques:

Problème	Solution
<i>L'appareil ne s'allume pas</i>	La pile doit être rechargée
<i>L'appareil ne se charge pas</i>	Est-ce que le chargeur est connecté à l'appareil/branché à l'alimentation électrique allumée ? Tous les branchements sont-ils fiables ?
<i>Les deux grands LEDs ne semblent pas allumés/ fonctionner.</i>	Ces ondes LED sont diffusées dans le champ invisible du spectre et ne peuvent donc pas se voir à l'œil nu. Pour vérifier si elles fonctionnent, visionnez-les avec l'appareil photo de votre téléphone cellulaire.

Caractéristiques techniques:

L'appareil possède une série de LED munies de diodes émettant de la lumière rouge & infra-rouge à grande puissance.

Puissance de sortie:	1300 mW
Couverture:	4.7 cm ²
Longueur d'ondes:	633nm rouge, 850nm infra-rouge
Alimentation réseau:	100 ~ 240 VAC
Voltage de la pile:	7.2V DC
Chargeur de piles:	12 V, 1 A
Poids:	280 grammes
Durée de charge:	3 – 4 heures

Accessoires standard

- Bloc d'alimentation électrique
- Guide d'utilisation
- Sac avec cordon

Etats infectieux : e.g états associés à un virus/herpès, infections bactériennes ou fongiques :

Merci de ne pas poursuivre le traitement. A utiliser trois (3) à cinq (5) fois par semaine, pendant quatre (4) semaines, ou jusqu'à ce que l'état s'améliore. Photizo® Vetcare stimule le système immunitaire, et peut entraîner l'organisme à fabriquer des anticorps contre l'agent pathogène.

Fonctionnement du Photizo® Vetcare

- Le Photizo® Vetcare fonctionne avec pile ou sur secteur.
- Pour l'allumer, appuyer sur le bouton d'alimentation. Le voyant indicateur de charge s'allumera et l'appareil bippera deux fois.
- Une fois le cycle de traitement achevé, il bippera 2 fois et s'éteindra automatiquement.
- La lentille en verre du Photizo® va chauffer au rythme des cycles de traitement répétés, à cause de l'énergie de la lumière émise. Si la lentille devient trop chaude au toucher, suspendez le traitement pendant quelques minutes pour permettre à la lentille de se refroidir avant de reprendre le traitement.
- Pour éteindre l'appareil pendant le cycle de traitement, appuyez en maintenant le bouton d'alimentation pendant 1 seconde.
- En ce qui concerne la puissance de la pile, le voyant indicateur de charge sera vert, orange ou rouge. Vert indique une pile chargée et rouge une pile déchargée. Une fois la batterie vide, elle s'éteindra automatiquement et bippera 2 fois. L'appareil ne se rallumera pas tant qu'il restera branché.
- Lorsqu'il sera branché, il bippera 1 fois, et après un court délai, le voyant indicateur de charge commencera à clignoter. Si la pile est à plat, il commencera à clignoter rouge, puis orange et vert, lorsque la pile se chargera. Une fois la pile totalement chargée, le voyant cessera de clignoter et sera vert de façon permanente.

Précautions d'usage

Merci de noter que le Photizo® Vetcare doit être vu comme un traitement complémentaire, utilisé conjointement à un traitement médical et que les fabricants et distributeurs du Photizo® Vetcare recommandent toujours l'usage de l'appareil sous le contrôle d'un médecin. Il n'a pas vocation à remplacer les procédures médicales standard, la médication et/ou le traitement. Les fabricants et distributeurs du Photizo® Vetcare ne peuvent, en aucun cas, être tenus responsables pour tout dommage, perte ou blessure subis en utilisant l'appareil en-dehors des procédures recommandées et des protocoles de traitement. Veuillez noter également que tous les états de santé ne tireront pas le même bénéfice de la luminothérapie. Ne vous reposez pas seulement sur le Photizo® Vetcare et ne cessez pas l'usage d'autres médicaments, antibiotiques ou traitements antifongiques.

Cancer: La luminothérapie ne soigne ni ne provoque le cancer. N'utilisez pas la luminothérapie sur un cancer ou une masse suspectée cancéreuse. La luminothérapie ne peut pas provoquer le cancer. Aucun effet de mutation n'a été prouvé pour les appareils à LED utilisant la luminothérapie, dans la littérature médicale ou scientifique, à ce jour. La lumière produite par Photizo® Vetcare est une lumière non ionisante infra-rouge et proche infra-rouge, et se trouve à l'extrême opposé du spectre de lumière de la dangereuse lumière ultraviolette (UV). Le Photizo® Vetcare est, cependant, utile pour traiter les nombreux effets secondaires liés au traitement du cancer, tels que la mucosite, un effet secondaire douloureux de la radiothérapie.

Grossesse: La photonthérapie est un traitement sécurisé et efficace pendant la grossesse. Les effets de la thérapie par la lumière rouge ou infra-rouge n'ont pas été testés pendant la grossesse. Même si le fœtus ne peut pas être influencé négativement par la lumière, nous ne recommandons pas l'utilisation du Photizo® Vetcare sur des zones situées directement au-dessus du fœtus en développement.

Epilepsie: Certaines études suggèrent que la lumière pulsée visible à des fréquences dans la série 5-10 Hz peut induire des crises. Le Photizo® Vetcare n'impulse pas dans la série 5-10 Hz, cependant, quelqu'un souffrant de telles crises, devrait éviter de regarder directement le faisceau de lumière émis depuis le capteur, par mesure de prévention.

Ne sur-traitez pas: cela n'aboutira pas à une guérison ou un soulagement de la douleur plus rapides. Un usage quotidien excessif peut provoquer une surstimulation et retarder la guérison (effet inhibiteur).

- Chez certains animaux souffrant d'états chroniques, le traitement initial par la lumineothérapie peut provoquer un léger inconfort. Cela est dû à la réponse du corps pour débiter le processus de guérison. Cela ne doit pas être une cause d'inquiétude et le traitement doit être poursuivi.
- Aucune protection pour les yeux n'est nécessaire, mais comme la lumière est très vive, ne regardez pas directement la lumière émise.
- La lentille de l'appareil Photizo® va chauffer au rythme des cycles de traitement répétés, à cause de l'énergie de la lumière émise. Si la lentille devient trop chaude au toucher, suspendez le traitement pendant quelques minutes pour permettre à la lentille de se refroidir avant de reprendre le traitement.
- Merci de ne pas interrompre les médications et les prescriptions des vétérinaires. Le traitement Photizo® Vetcare est un traitement complémentaire, assistant et stimulant les cellules pour accélérer les processus de guérison, soulager la douleur et les crampes musculaires, et stimuler le système immunitaire.

Préparation au traitement

Nettoyage, entretien et rangement

Le Photizo® Vetcare doit être nettoyé avant et après usage, à l'aide d'un tissu propre et d'alcool à 90°. Il doit toujours être rangé dans un endroit sûr, sec, de préférence l'intérieur du sac de transport fourni. L'appareil doit être utilisé avec soin, il ne doit pas être utilisé ni immergé dans l'eau.

Le Photizo® Vetcare possède une sauvegarde étendue sur le produit et une option de maintenance sous garantie.

Les diodes LED peuvent fonctionner jusqu'à 50 000 heures sans perte significative de puissance. Nettoyez la peau avant l'application du traitement car des poussières peuvent bloquer la lumière. Il est conseillé de raser la zone affectée, puisque les poils peuvent aussi gêner la pénétration de la lumière.

Vous pouvez protéger le capteur de la contamination en le recouvrant de plastique transparent.

mais aidera au processus de guérison en stimulant le système immunitaire, accélérant la guérison et aidant la médication à être administrée vers les zones affectées. Le drainage chirurgical des abcès est dans certains cas indiqué, avant que le traitement optimal soit efficace.

Problèmes articulaires, contusions osseuses, fractures de fatigue & lésions du cartilage:

- Blessures aiguës: Débutez le traitement dès que possible. Couvrez toute la ligne articulaire ou la zone blessée. Traitez chaque jour pendant 10 jours et renouvelez le traitement 3 fois par semaine jusqu'à guérison.
- Etats articulaires aiguës, tels que l'arthrite, la dysplasie de la hanche : traitez 1 fois/jour pendant 5 à 7 jours, pour réduire le processus inflammatoire et contrôler la douleur. Puis, traitez 2 à 3 fois/semaine pendant 2 semaines. Réduisez la fréquence de traitement à 1 fois/semaine, lorsque l'état se stabilise. Couvrez toute la ligne articulaire avant, côtés et arrière.

Lésions des tissus profonds & hématomes:

Commencez à traiter dès que possible, après la survenue de la blessure et couvrez toute la zone affectée. Si un œdème est présent, traitez aussi les ganglions lymphatiques proximaux pour assurer un drainage plus rapide des déchets et des composés protéiques. Traitez chaque jour jusqu'à guérison.

Traitements post-opératoires :

Traitez directement après la chirurgie, particulièrement sur les chevaux. Le traitement aidera à prévenir la formation de cicatrices granuleuses. Traitez chaque jour pendant 5 à 10 jours. Les bénéfices du traitement sont le soulagement de la douleur, une guérison plus rapide, la réduction du tissu cicatriciel, la stimulation immunitaire et une réduction de l'enflure.

Autres : Il est recommandé que le traitement de ces états soit effectué par un vétérinaire qualifié !

Les lésions oculaires, ulcères cornéens, états associés à un virus/herpès, sinusite, traumatismes rétro-orbitaires.

Lésions oculaires : Bien que la lumière du Photizo® Vetcare soit vive, elle n'endommagera pas l'oeil et le traitement des lésions oculaires accélérera la guérison. Si l'animal est apeuré par la lumière, vous pouvez appliquer le traitement depuis le côté de la tête, puisque la lumière pénètre l'os. Traitez 1 fois/jour pendant 5 à 7 jours.

Problèmes des tissus mous : muscles, tendons, fascias & ligaments:

Blessures aiguës:

Commencez à traiter la zone blessée et douloureuse 1 fois/jour, pendant 10 jours. Puis, si l'état persiste ou l'animal continue à sentir une gêne, traitez 2 à 3 fois/semaine.

En cas de douleur aiguë, vous pouvez traiter 2 fois/jour pendant 2 ou 3 jours, mais revenez à 1 fois/jour pendant 10 jours.

En cas de crampes et de nœuds musculaires douloureux, intégrez ces zones au traitement. Le traitement des points d'acupuncture est aussi indiqué et a de bons résultats.

Problèmes chroniques et de fatigue:

Traitez les zones affectées 1 fois/jour, pendant 5 à 7 jours ; puis, revenez à 2 ou 3 fois/semaine pendant 3 semaines. Si une gêne est toujours présente, continuez 1 fois/semaine. Si le problème persiste, merci de réévaluer l'état ou consultez un vétérinaire.

Mastites:

Bétail : Traitez directement le pis affecté avec double dosage, 2 à 3 fois/semaine, jusqu'à amélioration. N'interrompez pas les médications topiques ou systémiques.

Animaux domestiques : Traitez la zone affectée 1 fois/jour, jusqu'à amélioration.

Plaies, lacérations, nécroses suite à des morsures de tiques hyalomma, abcès, lésions dues au parasite habronema, cicatrices granuleuses, granulomes de léchage, meurtrissures, otites externes, pyodermites

- Lésions aiguës : Débutez le traitement dès que possible pour stimuler la réparation des cellules. Traitez toutes les lésions aiguës de la peau chaque jour jusqu'à guérison.
- Problèmes de peau chroniques : Traitez 1 fois/jour pendant 5 à 7 jours, puis 2 fois/semaine. Vous pouvez réduire le traitement à 1 fois/semaine lorsque l'état se stabilise, pour maintenir une peau en bonne santé.
- Etats infectieux, e.g. abcès, habronema, cornybactérie, etc. : Le traitement avec le Photizo® Vetcare ne remplace pas les antibiotiques ou toute autre médication prescrite,

Comment administrer le traitement ?

- Placez le capteur en contact direct avec la peau sur la zone à traiter et appuyez sur le bouton d'alimentation. L'appareil bippera deux fois.
- Gardez le capteur en position jusqu'à ce que l'appareil bippe à nouveau. Il s'éteint automatiquement. Cela indique 1 dose. Si un double ou triple dosage est nécessaire, (voir la table cidessous), gardez le capteur en position et répétez la dose.
- Déplacez le capteur vers la zone suivante. Appuyez encore sur le bouton d'alimentation.
- Répétez jusqu'à ce que toute la zone affectée ait été traitée.
- La lentille de l'appareil Photizo® va chauffer au rythme des cycles de traitement répétés, à cause de l'énergie de la lumière émise. Si la lentille devient trop chaude au toucher, suspendez le traitement pendant quelques minutes, pour permettre à la lentille de refroidir avant de reprendre le traitement.

Comment le Photizo® Vetcare aide-t-il au soulagement de la douleur, à la guérison et à la stimulation immunitaire ?

Lésions aiguës:

Photizo® Vetcare stimule la production d'énergie (ATP) dans la cellule, jusqu'à 250 fois, stimulant les cellules pour qu'elles fonctionnent à leur niveau optimal. Il stimule et régule la synthèse de l'ADN et l'ARN -les programmes au cœur de la cellule- pour suivre le processus de guérison, et régule la formation du tissu cicatriciel. Cela accélère le processus de guérison naturel de 30-40% et réduit la possibilité de formation excessive de tissu cicatriciel et de complications.

Photizo® Vetcare stimule la sécrétion d'endorphine et de sérotonine. Photizo® Vetcare réduit efficacement le processus inflammatoire causé par les dommages, lésions ou fatigue, ainsi que les crampes et les nœuds musculaires. Il aide à réduire l'enflure en augmentant le diamètre des vaisseaux sanguins et lymphatiques, pour évacuer l'excès de déchets provenant des zones lésées ou enflammées.

Cela réduit la pression et l'irritation sur les terminaisons nerveuses, provoquant plus de douleur, et augmente le débit sanguin dans la zone, assurant que les tissus peuvent absorber plus de nutriments et d'oxygène.

Cela aide aussi à réduire un excès de substrat sur la plaie et diminuer ainsi le risque d'infections bactériennes secondaires. L'afflux sanguin en hausse vers la zone assure des concentrations plus élevées en médicaments topiques et systémiques délivrées dans la zone affectée.

Photizo® Vetcare stimule les cellules immunitaires pour réagir contre les infections. Il stimule l'état cellulaire optimal (peau, os, nerfs, capsules, cartilage et tissu musculaire) pour maintenir les tissus en bonne santé. Cela peut aider à prévenir la dégénérescence des tissus comme les nerfs, les os/articulations et vaisseaux sanguins.

Blessures de fatigue et états chroniques:

Les phases de guérison des tissus comportent 3 étapes, l'inflammation, la prolifération et la phase d'organisation. Les "lésions" chroniques ou réactions inflammatoires de fatigue surviennent lorsque le tissu n'a pas achevé ce cycle. Le tissu reste au stade inflammatoire et n'évolue pas vers la phase de prolifération et d'organisation (la guérison réelle des cellules et des tissus).

Pour que ces "lésions" guérissent, le corps a besoin de la stimulation des programmes des cellules (ADN et ARN), e.g. de finaliser la phase d'inflammation et passer à la phase réelle de guérison. Lorsque le processus d'inflammation s'organise en formation de tissu cicatriciel, il provoque des adhérences qui inhibent le "glissement" normal des fibres musculaires et des tissus, provoquant l'irritation, et plus d'inflammation, engendrant un cercle vicieux.

Photizo® Vetcare soulage et relâche les crampes et les noeuds musculaires, réduit les processus inflammatoires et soulage la douleur, rompant ainsi le cercle, donnant aux tissus l'occasion de débiter le processus de guérison, si possible, ou dans des états chroniques, de conserver des périodes sans souffrance.

Merci de noter que le traitement avec le Photizo® Vetcare ne détruira pas les adhérences, mais contrôlera les processus inflammatoires et la gêne, et réduira le risque de formation de tissu cicatriciel supplémentaire. Traitez toujours directement dès le début du problème, car cela aidera à prévenir les problèmes chroniques.

Douleurs chroniques : tous types de lésions arthritiques et articulaires irréversibles, crampes musculaires chroniques, points d'acupuncture

- Le Photizo® Vetcare stimule la sécrétion d'endorphines et de sérotonine. (Cet effet est particulièrement marqué chez les félins).
- Photizo® réduira efficacement le processus inflammatoire causé par les lésions et la fatigue. Le traitement réduira les crampes musculaires et relâchera les nœuds musculaires. Il aidera aussi à réduire l'enflure en augmentant le diamètre des vaisseaux sanguins et lymphatiques, pour évacuer les déchets depuis la zone affectée. Cela réduit la pression et l'irritation sur les terminaisons nerveuses qui provoquent encore plus de douleur. L'augmentation de l'afflux sanguin dans la zone garantit que les tissus peuvent absorber plus de nutriments et d'oxygène.
- Le traitement réduit la vitesse de conduction et l'irritabilité des nerfs conducteurs de la douleur.
- Photizo® réduit efficacement les crampes musculaires et relâche les points tendus.
- Le traitement stimulera la condition optimale des cellules (os, nerfs, capsules, cartilage et tissu musculaire) pour maintenir les tissus en bonne santé. Cela peut aider à prévenir plus de dégénérescence de tissus comme les nerfs, les os/articulations et vaisseaux sanguins.
- Le traitement sur les points d'acupuncture a d'excellents résultats.

Etats et Traitements

VEUILLEZ NOTER LES ELEMENTS SUIVANTS:

Pour un traitement efficace, les petits animaux et le bétail ont besoin de dosages différents. Le Photizo® Vetcare est programmé pour fournir une dose efficace en une seule fois. Pour les différents types d'animaux, merci de suivre les consignes de traitement suivantes :

<i>Familles d'Etats</i>	<i>Animaux domestiques</i>	<i>Large Bétail et Chevaux</i>
<i>Problèmes de peau</i>	<i>Dose simple</i>	<i>Dose simple</i>
<i>Superficiel - Muscle /Tendon/Ligament</i>	<i>Dose simple</i>	<i>Double dose</i>
<i>Profond - Muscle /Tendon/Ligament</i>	<i>Dose simple</i>	<i>Triple dose</i>
<i>Problèmes articulaires et osseux</i>	<i>Dose simple</i>	<i>Double dose</i>